

Prelievo di sangue in tre operazioni

- 1 Ruotare e tirare il cappuccio protettivo
- 2 Regolare la profondità di penetrazione
- 3 Appoggiare il pungidito e far scattare l'ago premendo il pollice



REF	03.603.539.150
BEZ	Accu-Chek Safe-T-Pro Plus
VPE	200 pezzi
Pharmacode	3747283
	Monouso



Roche Diagnostics (Schweiz) AG
6343 Rotkreuz
www.accu-chek.ch

ACCU-CHEK®

Vivi la vita. Come vuoi.

Il pungidito monouso praticamente indolore con
3 diverse profondità di penetrazione
per l'uso professionale



ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Guida rapida




ACCU-CHEK®

Vivi la vita. Come vuoi.

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

- L'innovativo pungidito monouso con tre diverse profondità di penetrazione
- La tecnologia Safe-T garantisce sicurezza e igiene massimi

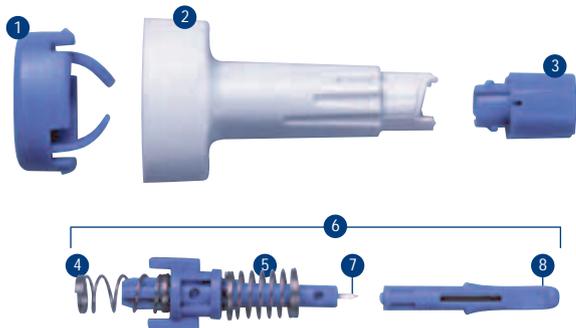

- | | |
|--|------------------------|
| 1 Pulsante di scatto | 5 Molla di retrazione |
| 2 Alloggiamento a «T» | 6 Lancetta |
| 3 Regolazione della profondità di penetrazione | 7 Ago |
| 4 Molla di scatto | 8 Cappuccio protettivo |

Pretrattamento del dito


Lavare le mani in acqua calda e asciugarle accuratamente. Per migliorare la circolazione si può massaggiare addizionalmente il dito prima della puntura. Disinfettare il sito della puntura e lasciarlo asciugare bene.

Scelta del sito della puntura

Per prelevare sangue capillare i punti più adatti sono i lati del polpastrello, dove l'irrorazione sanguigna è massima e la sensibilità dolorifica è minima.

Scelta della profondità di penetrazione

Accu-Chek Safe-T-Pro può essere regolato su tre diverse profondità di penetrazione:

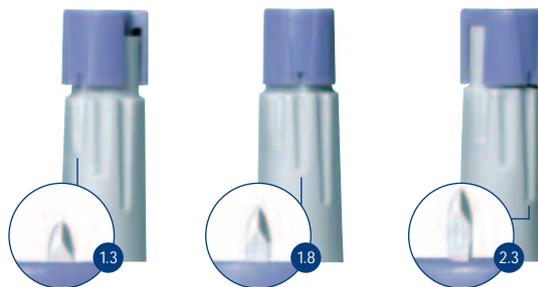

- | | |
|---------------------|--------|
| Profondità minima: | 1,3 mm |
| Profondità media: | 1,8 mm |
| Profondità massima: | 2,3 mm |

Consigli per la regolazione della profondità di penetrazione

- Livello 1 per pelle delicata
- Livello 2 per pelle normale
- Livello 3 per pelle spessa

Trattamento successivo

Detergere il polpastrello con un tampone pulito ed eventualmente applicare un cerotto.

Smaltire Accu-Chek Safe-T-Pro dopo l'uso.



Siti della puntura appropriati