


01 PRIMO PASSO

Prima di incominciare il test, tirare fuori la cassetta dal sacchetto di alluminio e aspettare che vada a temperatura ambiente.

02 SECONDO PASSO

Utilizzare il pungidito per creare una micro ferita.
Posizionare l'ago sul dito per poi spingere.
Una volta eseguita l'operazione, stringere il dito per far uscire le gocce di sangue.

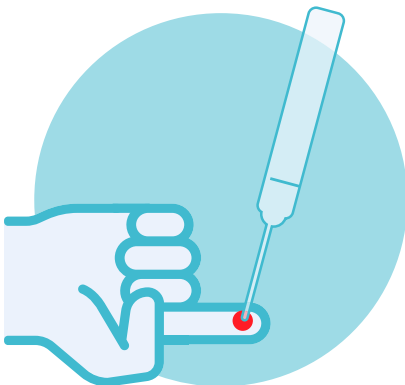



03 TERZO PASSO

Con la pipetta, aspirare il sangue emerso dalla ferita.

04

QUARTO PASSO


Con la pipetta monouso, trasferire 2 gocce di plasma (A) o 1 goccia di sangue (B) nel pozzetto della cassetta. Attendere poi 15 minuti per il risultato.

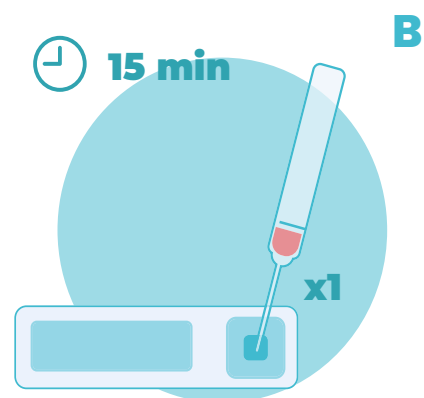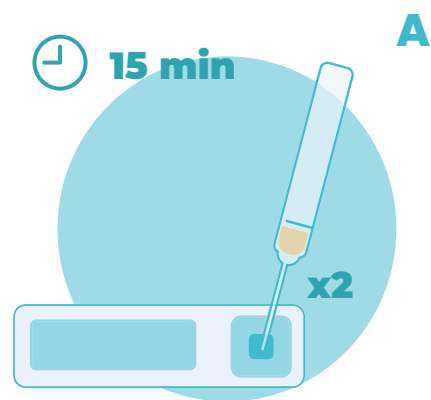


CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 2 - 30 C°. Non congelare.


05 ANALISI RISULTATI

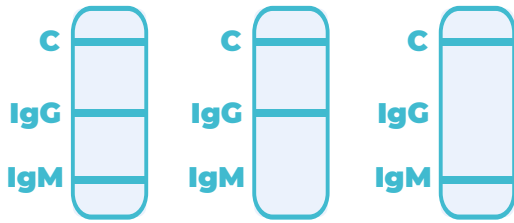

POSITIVO

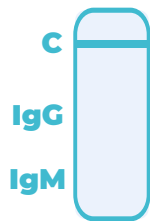

NEGATIVO

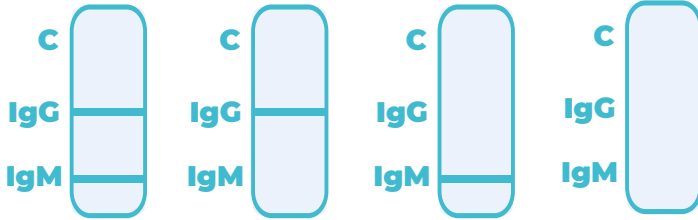

INVALIDO

POSITIVO: Appaiono tre linee nella regione C, IgG e IgM.

Oppure due linee nella regione C e IgG o nella regione C e IgM.

NEGATIVO: appare solo una linea nella regione C.

INVALIDO: Appaiono due linee nella regione IgG e IgM, oppure appare una linea solo nella regione IgG o solo nella regione IgM, oppure non appare nulla.