




## 01 PRIMO PASSO

Trasferire tutto il contenuto del buffer di estrazione nel campionatore. Poi rilasciare al suo interno la tua saliva.

## 02 SECONDO PASSO

Se la saliva risulta densa, mescolare il tutto con il contagocce. Infine chiudere il campionatore e capovolgerlo per 10 volte per mescolarlo.

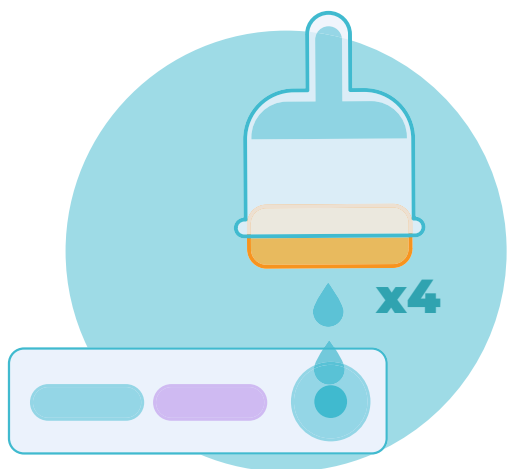

## 03 TERZO PASSO

Estrarre il test e aggiungere nel pozzetto 4 gocce di saliva. Capirai che il test sta incominciando a elaborare il risultato, vedendo comparire del viola nella finestrella del risultato.

## 04 QUARTO PASSO

Attendere 15-20 minuti per leggere il risultato.




## 05 ANALISI RISULTATI

**POSITIVO:** Comparare la linea nelle regioni T e C.

**NEGATIVO:** Comparare la linea solo nella regione C.

**INVALIDO:** Comparare una linea solo nella regione T oppure non compare nessuna linea. Il test è da rifare.

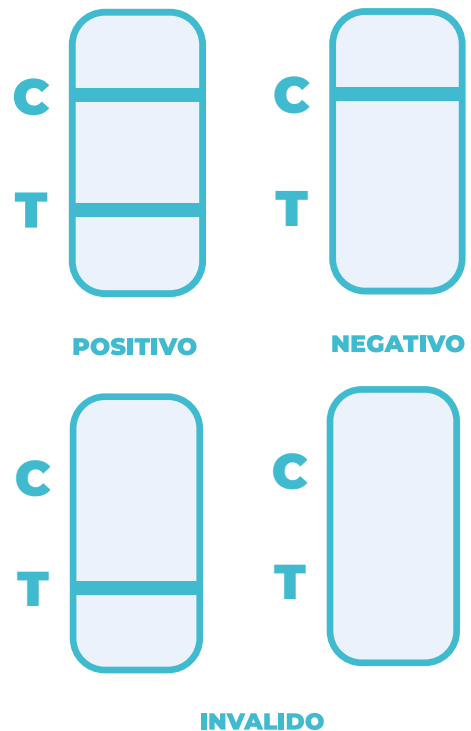

### CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura di 2 - 30 C°. Non congelare. Tenere lontano da umidità, calore e luce diretta. Una volta aperto il sacchetto di alluminio, il kit deve essere utilizzato entro 60 minuti.